

Neater Drinker - flexible avec pailles - Instructions

Description

- **Neater Drinker ND00009** fourni un support stable et ajustable pour 2 pailles flexibles.
- Le système anti reflux maintient le liquide au niveau du bord de la paille, rendant ainsi plus facile l'aspiration.

Mise en place - Voir image ci-dessous.

- Fixer l'étau à la table.
- Cliper la paille au tube flexible.
- Ajuster le flexible dans la position voulue.
- **EVITER DE POSITIONNER LE BRAS EN CREAT DES ANGLES TROP NETS. NE PAS TIRER SUR LE BRAS CAR CELA PEUT L'ENDOMMAGER.**
- Utiliser le velcro pour fixer la paille au flexible.
- Veillez à ce que la tasse ou le gobelet utilisé soit assez stable.


Utilisation de la brosse de nettoyage.

- Insérer le goupillon par l'extrémité sans poils dans toute la paille, le passer jusqu'à la fin du goupillon.
- Pousser vers l'arrière et vers l'avant, en répétant le mouvement plusieurs fois si besoin.
- Une solution de nettoyant alimentaire peut être utilisé si besoin.
- Rincer à l'eau avec la seringue.

Sécurité



- Le Neater Drinker ne doit être utilisé seulement pour boire des liquides consommables.
- Ne convient pas à des personnes souffrants de troubles de déglutition ou susceptibles de faire des fausses routes.
- Les boissons ne doivent pas être brûlantes..
- La bouche doit toujours être au dessus de la paille, afin d'éviter l'étouffement.
- Nettoyer toutes les pièces avant utilisation. Vérifier qu'il n'y ait aucune fissure ou qu'aucune pièce ne puissent se détacher et provoquer un étouffement.
- Prenez soin de ne pas mettre la paille trop près des yeux, ni dans le fond de la gorge.

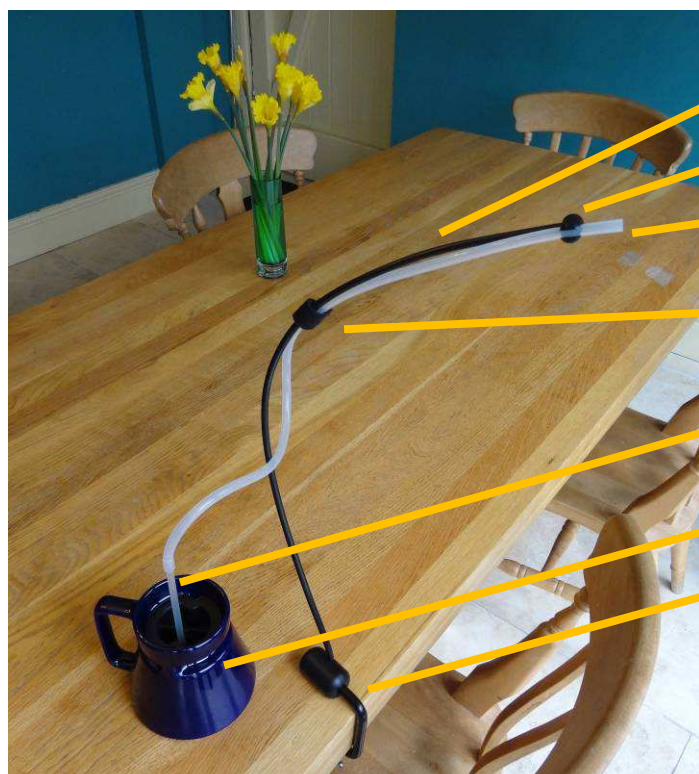

Flexible

Double Clip

Paille

Velcro

Système anti-reflux

Mug céramique (non inclus)

Etau

