

Robot d'aide aux repas

BESTIC™



Facilité d'installation :

Bestic™ est léger et peut être transporté partout (sac à dos fourni). Il se pose sur une table sans adaptation nécessaire.

Bestic™ est un robot d'aide aux repas destiné aux personnes ayant des difficultés à utiliser leurs bras ou leurs mains. Il réalise, lui même, tous les gestes nécessaires pour porter les aliments de l'assiette à la bouche.

Garantie : 2 ans

Tarifs : Nous consulter

Remboursement SS : Non

Fonctionnement du robot d'aide au repas BESTIC™

Les mouvements de BESTIC™ sont entièrement automatiques. L'utilisateur n'a pas besoin de déplacer ses bras et ses mains pour manger. A l'aide d'un contacteur simple ou d'un contacteur multidirectionnel, l'utilisateur va pouvoir déclencher le balayage de l'assiette et la mise à la bouche des aliments.

Les mouvements de BESTIC™ sont doux et silencieux.

Une batterie, rechargeable via un cordon d'alimentation, rend le robot autonome une fois installé sur la table.

Aucune adaptation de la table d'accueil n'est nécessaire.

Son design raffiné et sa couleur neutre, blanche, assure sa discrétion sur une table.

BESTIC™ est livré avec :

- Deux assiettes
- Deux cuillères plastique ou métallique
- Un contacteur pour les réglages
- Un contacteur simple
- Un tapis antidérapant
- Un chargeur
- Un sac à dos

Les versions du robot d'aide au repas BESTIC™

BESTIC™ se décline en deux versions :

Version mono profil : un seul réglage de la hauteur et de la bouche peut être enregistré dans le BESTIC™.

Version multi profil : jusqu'à quatre réglages différents peuvent être enregistrés. Ainsi, un utilisateur qui change d'environnement régulièrement, peut enregistrer les différents paramètres et éviter ainsi de nouvelles programmations pour la hauteur de la bouche.

Options :

BESTIC™ peut-être accompagné, en option, de commande spécifique :

- Contacteur sensible
- Contacteur aux pieds
- Tablette Butler (tablette facilitant l'accès du BESTIC à l'utilisateur)



Autre option du BESTIC™: une petite assiette est également disponible.

ERGO
DIFFUSION

ergo-diffusion

71 Avenue Alphonse Legault BP 97405

35174 BRUZ Cedex

contact@ergo-diffusion.com

