

MISE EN PLACE RAPIDE DU NEATER EATER ELECTRIQUE V6



Ce document a pour but de faciliter la mise en place du NEATER.

Pour plus de réglages sur le robot, consultez la notice.

Attention :

Pour une installation optimale, nous vous conseillons de mettre en charge le V6.

Pour mettre en charge :

1. Insérez le cable d'alimentation à l'arrière du robot.
2. Branchez sur une prise secteur.
3. La tablette peut se recharger directement sur le robot en la plaçant devant (comme présenté sur la photo en bas à gauche). Une charge complète prendra environ 8 heures; si vous n'avez pas le temps de le mettre en charge, le robot peut être utilisé même branché sur secteur.



Etape 1



Etape 2



Etape 3


1- Installer les accessoires :

- * Assiette et cuillère
- * Si vous utilisez des contacteurs, branchez les à l'arrière du robot.

Contacteur cuillère : toujours position ①

Contacteur rotation assiette : toujours ②

- * Puis allumer le robot et la tablette.

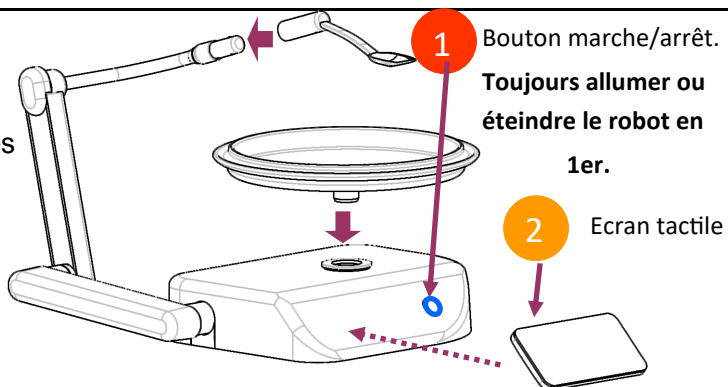

2- Régler la position de la cuillère à la bouche :

- * Cliquer sur l'icône régler la bouche ?

- * Puis cliquer sur l'icône ajuster à la main

Une icône va apparaître et vous demander de guider la cuillère jusqu'à la bouche de l'utilisateur.



Vous pouvez manuellement bouger ces 2 segments afin d'amener la cuillère près de la bouche de l'utilisateur.

NE PAS TOUCHER AU SEGMENT ROND AVEC LA CUILLERE.

Une fois la position trouvée, cliquer sur l'icône pour enregistrer la position.

3- Sélectionner l'assiette :

Une fois la position bouche enregistrée, le robot vous demande de choisir votre assiette.



1. Cliquez sur cette icône

2. puis sur assiette plastique.



4- Bon appétit !!!



Cette icône ou le contacteur 1 permet de déclencher le mouvement de la cuillère.



Cette icône ou le contacteur 2 permet de déclencher la rotation de la cuillère.

ROBOT D'AIDE AUX REPAS

Ce manuel utilisateur est également disponible sur notre site : www.neater.co.uk

Le Neater Eater est simple à utiliser. Des images ainsi que des vidéos affichées à l'écran vous guident pour faire les choix les mieux adaptés à vos besoins. Appuyez sur ? pour obtenir de l'aide. Appuyez et maintenez la touche pour visionner des vidéos instructives.

Nous vous recommandons de vous entraîner à appuyer sur les touches et à tester différentes options.



UN PROBLÈME ? Redémarrez le robot et attendez que l'écran de veille/démarrage s'affiche

TABLE DES MATIÈRES

- [Santé et sécurité](#)
- [Introduction](#)
- [Alimentation et batteries](#)
- [Contacteur On et Off](#)
- [Premier démarrage](#)
- [Prise de repas simple](#)
- [Activer des fonctionnalités supplémentaires lorsque la cuillère est au repos](#)
- [Activer des fonctionnalités supplémentaires pendant le repas](#)
- [Menu paramètres](#)
- [Vérifier la position de la bouche](#)
- [Vérifier l'assiette](#)
- [Temps d'attente](#)
- [Paramètres de ramassage](#)
- [Autres paramètres de ramassage](#)
- [Paramètres de rotation de l'assiette](#)
- [Autres paramètres](#)
- [Gérer les utilisateurs](#)
- [Paramètres avancés](#)
- [Accès au menu](#)
- [Dépannage](#)
- [Bluetooth non connecté](#)
- [Santé et sécurité avancées](#)

SANTÉ ET SECURITÉ

- Le Neater Eater ne doit pas être utilisé par des personnes atteintes de troubles de déglutition ou susceptibles de s'étouffer, sauf sous la surveillance ou avec l'accord d'un(e) orthophoniste.
- Les personnes atteintes de mouvements incontrôlés, en particulier les mouvements du corps ou de la tête, ne doivent utiliser aucun couvert rigide ou tranchant, telles les cuillères ou les fourchettes en métal.
- N'utilisez pas le détecteur intégré du Neater Eater comme dispositif de sécurité.
- Assurez-vous que le Neater Eater reste stable lorsqu'il est en action. Des serre-joints sont disponibles si besoin.
- N'installez aucune carte SIM dans la tablette, car les appels téléphoniques peuvent affecter le fonctionnement du Neater Eater.
- [Santé et sécurité avancées](#)

INTRODUCTION



Le Robot Neater Eater vous aide à vous alimenter seul. Il est simple à utiliser et possède toute une gamme de fonctionnalités qui vous permettent d'apprécier vos repas.

Le Neater Eater peut mémoriser 5 programmes différents de choix de fonctionnalités pour divers utilisateurs ou diverses situations.

Il est possible de raccorder des contacteurs optionnels sur le Neater Eater pour assurer la commande de ce dernier ; vous pouvez aussi utiliser tout simplement l'écran tactile de la tablette fournie. L'écran est utilisé pour choisir les fonctionnalités et apprendre au Neater Eater où se trouve votre bouche.

La tablette est maintenue sur l'avant du Neater Eater grâce à des aimants. Il vous suffit de tirer dessus pour la déplacer et la positionner à un endroit plus pratique pour vous.

ALIMENTATION ET BATTERIES



Vous pouvez recharger la batterie située à l'intérieur du Neater Eater en la raccordant à l'alimentation électrique. Laisser le Neater Eater branché toute la nuit pour que la batterie se recharge. Un voyant **verte** indique que l'alimentation externe est branchée. Un voyant **orange** indique que la batterie est en charge. Si la voyant **verte** est allumée et que le voyant **orange** n'est pas allumée, la batterie est complètement chargée. Vous pouvez utiliser le Neater Eater lorsqu'il est en charge.

La batterie située dans la tablette se charge automatiquement dès qu'elle est maintenue avec les aimants sur l'avant du Neater Eater. (Nécessite une alimentation externe branchée au robot ou aux batteries du robot bien plus élevée que les batteries de la tablette.) Brancher le robot à une source externe **avant** l'éteindre pour assurer la recharge de la tablette.

Un voyant **rouge** situé à l'arrière du Neater Eater indique que la tablette est en charge (même quand le Neater Eater est éteint). Un voyant **rouge** situé sur la tablette indique que cette dernière est en charge. Un voyant **verte** situé sur la tablette indique qu'elle est totalement chargée. Laissez la tablette sur l'avant du Neater Eater lorsqu'il n'est pas utilisé, afin de recharger la batterie.

Le voyant **bleu** situé à l'arrière du Neater Eater indique que la connexion Bluetooth est activée sur la tablette.

CONTACTEUR ON ET OFF



Pour allumer:

1. Appuyez sur le bouton situé sur l'avant du robot Neater Eater.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la tablette pour activer l'écran.

(Si la tablette ne se réveille pas immédiatement, elle est hors tension. assurez-vous qu'elle est chargée à au moins 5% et maintenez le bouton Marche jusqu'à ce que l'écran s'allume. Cela peut prendre quelques minutes.

Éteindre:

1. Maintenez le bouton enfoncé sur le devant du robot Neater Eater pendant 4 secondes.
2. Lorsque vous y êtes invité, mettez l'écran en veille.

PREMIER DÉMARRAGE

La première fois que vous allumez le Neater Eater, une vidéo de présentation s'affiche sur l'écran de la tablette. (vous pouvez choisir de ne pas revoir cette vidéo lors d'une prochaine utilisation). Vous pouvez régler le volume sur la tablette.



Votre nom

Si le Neater Eater n'a jamais été utilisé, votre nom à l'écran sera "Neater". Vous pouvez le modifier dans le menu [Sélectionner un utilisateur](#).

Raccorder la cuillère



Si aucune cuillère (ou autre couvert) n'est installé(e), une vidéo vous montre comment installer la cuillère. Un contacteur caché indique au Neater Eater si la cuillère est correctement installée.



Votre bouche

La cuillère se dirige ensuite vers votre bouche – jusqu'à l'endroit appris par le Neater Eater. Si la cuillère touche quelque chose sur le trajet (comme votre bouche), elle le détectera et s'arrêtera. Un message à l'écran vous invite alors à choisir entre continuer et apprendre au Neater Eater où se trouve votre bouche. Il vous demande aussi si vous avez besoin de modifier l'utilisateur sélectionné – si votre nom n'apparaît pas à l'écran.

[Passer à Apprendre position de la bouche](#)



Installer l'assiette

Les assiettes destinées au Neater Eater sont équipées d'une cheville sur le fond qui s'enclenche dans la cavité située sur le dessus du Neater Eater. Une vidéo vous montre comment installer l'assiette et vous assurer que les aliments sont hachés et prêts à être saisis. Lorsque vous cliquez sur continuer à l'écran ou sur le contacteur externe 1, le Neater Eater détecte le type d'assiette installé grâce au mouvement. Il vous est demandé de confirmer le type d'assiette détecté ou de choisir dans une liste. (Le choix peut également être effectué à l'aide des contacteurs externes) Vous êtes maintenant prêt à prendre votre repas.

PRISE DE REPAS SIMPLE

Appuyez sur les boutons situés à l'écran ou utilisez les contacteurs externes pour diriger le Neater Eater.



UN PROBLÈME ? Redémarrez le robot et attendez que l'écran de veille/démarrage s'affiche



Rotation de l'assiette

Le bouton du milieu (ou contacteur externe 2) est utilisé pour tourner l'assiette afin d'aligner les aliments avec la cuillère et permettre à cette dernière de les ramasser. Généralement, ce paramètre est défini de manière à tourner dans les deux sens, mais il peut être défini pour tourner dans un seul sens. Il est également possible de définir un paramètre pour que l'assiette tourne automatiquement entre deux ramassages d'aliments. Lorsqu'une assiette à compartiments est utilisée, la rotation de l'assiette s'effectue jusqu'au compartiment suivant. [Passer aux Paramètres de rotation de l'assiette](#)



Ramassage d'aliments

Le bouton gauche (ou contacteur externe 1) est utilisé pour activer ou suspendre le mouvement de la cuillère. Il peut être paramétré pour attendre qu'il soit possible de commencer un autre cycle, afin de laisser suffisamment de temps pour mâcher et avaler les aliments. [Passer aux Paramètres d'attente](#)



Si vous ne pouvez atteindre qu'un seul contacteur, il est possible de paramétrer le Neater Eater de manière que, lorsque la cuillère est au repos, une simple pression sur le contacteur de rotation de l'assiette, déclenche un cycle de la cuillère. [Jump to Scoop Settings](#)

ACTIVER DES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES LORSQUE LA CUILLÈRE EST AU REPOS



Le bouton droit de l'écran et le contacteur externe 3 peuvent être utilisés pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires. (Si activées dans [Paramètres de ramassage](#).)



Si une attache fourchette et/ou snack est activée dans [Paramètres de ramassage](#), vous pouvez alterner entre les modes de Ramassage **Cuillère** et **Fourchette** (et aussi le mode **Snack** s'il est activé) en appuyant sur le bouton. Le mouvement du bras et les options peuvent être modifiés en fonction des besoins.



Si une attache snack est activée dans les [Paramètres de ramassage](#), vous pouvez alterner entre les modes de Ramassage **Cuillère** et **Snack** (et aussi le mode **Fourchette** s'il est activé) en appuyant sur le bouton. Le mouvement du bras et les options peuvent être modifiés en fonction des besoins.



Il est possible d'activer le mode

Racler l'assiette en appuyant et en maintenant le bouton jusqu'à ce que l'icône Racler l'assiette apparaisse. Puis appuyez sur Marche pour que la cuillère racle les derniers morceaux d'aliments. L'assiette tourne en permanence tandis que la cuillère racle toute la surface de l'assiette pour rassembler les aliments. N'utilisez cette fonction que lorsqu'une petite quantité de nourriture reste dans l'assiette.

Le mode Racler l'assiette s'activera automatiquement à la fin du repas si la fonction de rotation automatique de l'assiette a été sélectionnée ou si les modes 1 contacteur ou 2 contacteurs ont été sélectionnés. (L'assiette aura déjà été balayée plusieurs fois).



Pour faire apparaître l'icône Menu, appuyez et maintenez le bouton plus longtemps.

Si cette fonctionnalité est activée dans [Autres paramètres](#), elle vous permet d'accéder aux menus paramètres grâce aux contacteurs externes. Voir [Accès aux menus contacteur externe](#) pour obtenir des instructions.

ACTIVER DES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES PENDANT LE REPAS

Le bouton situé droit de l'écran et le contacteur externe 3 peuvent être utilisés pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires si elles sont activées dans [Paramètres de ramassage](#). Il est possible de configurer la plupart des fonctionnalités pour qu'elles soient automatiques à chaque cycle de la cuillère, même si le bouton n'est pas activé. [Passer à Autres paramètres de ramassage](#)



Ramasser moins d'aliments

Si les aliments sont collants ou s'agglomèrent de manière importante, vous pouvez ramasser moins d'aliments en appuyant sur ce bouton ; cela permet de reculer légèrement la cuillère du bord de l'assiette avant qu'elle se soulève.



Nettoyer la cuillère

Si de la sauce s'écoule sous la cuillère, vous pouvez la nettoyer contre le bord de l'assiette. L'assiette tourne à partir de l'endroit où la cuillère a ramassé des aliments, afin d'éviter de mélanger différents types d'aliments dans l'assiette.



Vider la cuillère

Si vous ne voulez pas manger les aliments situés dans la cuillère (ou sur la fourchette), vous pouvez la vider avant la prochaine bouchée. L'assiette tourne à partir de l'endroit où la cuillère a ramassé des aliments, afin d'éviter de mélanger différents types d'aliments dans l'assiette.



Vider la fourchette

Si vous ne voulez pas manger les aliments situés au bout de la fourchette, vous pouvez les retirer avant la prochaine bouchée. L'assiette tourne à partir de l'endroit où la cuillère a ramassé des aliments, afin d'éviter de mélanger différents types d'aliments dans l'assiette.



Tremper des aliments dans la sauce

L'assiette à compartiments dispose d'un espace en son centre pour y disposer de la sauce et y tremper des aliments.

MENU PARAMÈTRES



Vous pouvez accéder aux paramètres lorsque la cuillère est au repos, en appuyant sur le bouton Paramètres situé à l'écran.

Si l'accès au menu contacteur externe est activé, vous pouvez également accéder aux paramètres en maintenant le contacteur externe 3 jusqu'à ce que le menu paramètres apparaisse et en appuyant sur le contacteur externe 1. Voir [Accès aux menus contacteur externe](#) pour obtenir des instructions.

Vous pouvez choisir de verrouiller le menu Paramètres à l'aide d'un code PIN pour empêcher toute autre personne de modifier vos paramètres.

Menu Paramètres :



[- Vérifier la position de la bouche](#)



[- Vérifier l'assiette](#)



[- Temps d'attente](#)



[- Paramètres de ramassage](#)



[- Paramètres de rotation de l'assiette](#)



[- Autres paramètres](#)

VÉRIFIER LA POSITION DE LA BOUCHE



Position de la bouche

Appuyez sur le bouton à l'écran pour que le robot apprenne rapidement une nouvelle position de la bouche.



Une vidéo s'affiche et demande à un aidant de bouger la cuillère manuellement, jusqu'à la position qui vous convient le mieux. Tenez le bras du robot, pas la cuillère.

L'angle d'inclinaison de la cuillère est fixe pour convenir au plus grand nombre d'utilisateurs.

Pour régler l'angle d'inclinaison de la cuillère, activez d'abord cette fonctionnalité dans [Autres paramètres](#).



Appuyez sur le bouton à l'écran (ou le contacteur externe 1) pour enregistrer et sur "Oui" (ou contacteur externe 1) pour confirmer.

Si les contacteurs externes sont utilisés ou si vous appuyez sur le bouton Position de la bouche à l'écran pendant un long moment, la position de la bouche sera vérifiée au démarrage :

La cuillère se dirige ensuite vers votre bouche – jusqu'à l'endroit appris par le Neater Eater. Si la cuillère touche quelque chose sur le trajet (comme votre bouche), elle le détectera et s'arrêtera. Un message à l'écran vous invite alors à choisir entre continuer et apprendre au Neater Eater où se trouve votre bouche. Il vous est également demandé si vous souhaitez modifier l'utilisateur sélectionné – si votre nom n'apparaît pas à l'écran.



Apprendre par contacteur

Apprendre par contacteur vous permet d'utiliser les boutons à l'écran ou les contacteurs externes pour bouger la cuillère de haut en bas et d'avant en arrière, afin de la positionner devant vous, puis cliquez pour enregistrer la position. Vous pouvez modifier la position de la cuillère mais PAS son angle d'inclinaison.

VÉRIFIER L'ASSIETTE



Le programme **Vérifier l'assiette** commence par une vidéo qui vous rappelle comment installer l'assiette et hacher les aliments à ramasser. Ensuite, cliquez sur "Vérifier l'assiette" ; le Neater Eater se met en mouvement et détecte le type d'assiette installé. Il identifie le type d'assiette lorsque la cuillère touche celle-ci. Il est nécessaire d'installer une cuillère de taille standard (non déformée) ; nous recommandons la cuillère en plastique Neater. Il vous est ensuite demandé de confirmer le type d'assiette ou de le sélectionner manuellement. Lorsque vous sélectionnez l'assiette, vous avez la possibilité de tester à nouveau l'auto-détection.

Si le robot détecte ou si vous sélectionnez une assiette à compartiments, le Neater Eater tourne l'assiette et utilise ses détecteurs pour trouver les compartiments. Une fois que l'assiette est sélectionnée, le Neater Eater poursuit vers le cycle Manger.

Les options d'assiette sont : Grande, Petite, Plastique, Chaude, Bol et à Compartiments. Si une assiette à compartiments est sélectionnée, le Neater Eater détecte la position des compartiments.

Une longue pression sur le bouton **Vérifier l'assiette** conduit directement à **Sélectionner l'assiette** sans proposer la détection automatique de celle-ci.

La dernière assiette utilisée est mise en évidence. Il est possible de sélectionner les assiettes à l'aide des contacteurs externes et de la tablette



Grande assiette Petite assiette Assiette plastique



Assiette chaude Bol de soupe Assiette à compartiments

TEMPS D'ATTENTE



Attendre avant le ramassage

Pour être sûr d'avoir suffisamment de temps pour mâcher et avaler vos aliments entre les cuillérées, vous pouvez programmer le Neater Eater pour qu'il respecte un temps d'attente entre les cycles de ramassage d'aliments.



Attente au bord de l'assiette

La cuillère marque une courte pause au niveau du bord de l'assiette. Cela vous donne la possibilité de suspendre le mouvement de la cuillère à cet endroit, de manière à tourner l'assiette pour aider au ramassage des aliments.

Attente à la bouche



Vous pouvez régler le temps d'attente de la cuillère (1 à 99 secondes) au niveau de votre bouche, afin de pouvoir retirer des aliments.

Attente entre les ramassages



Cette fonctionnalité permet de définir l'attente entre les ramassages.

Attente anti-tremblements



Le Neater Eater possède une fonctionnalité anti-tremblements : Après avoir cliqué sur Marche, le bouton pause ne peut fonctionner pendant une courte durée, afin d'éviter toute pause involontaire du ramassage. De même, cette mise en attente du bouton peut vous empêcher de recommencer un ramassage involontaire, alors que vous l'aviez mis en pause. Ce temps d'attente peut être réglé.

Vitesse de rotation de l'assiette



Lors de la rotation de l'assiette, celle-ci commence à tourner lentement puis, accélère. C'est ainsi que vous pouvez tourner l'assiette avec précision et faire un tour complet sans avoir à attendre longtemps.

PARAMÈTRES DE RAMASSAGE



Le Neater Eater possède toute une gamme de fonctionnalités. La plupart des fonctionnalités peuvent être définies pour s'exécuter automatiquement ou être limitées de manière à correspondre à vos besoins.



Si vous ne pouvez atteindre qu'un seul contacteur, il est possible de paramétrer le Neater Eater de manière que, lorsque la cuillère est au repos, une simple pression sur le contacteur de rotation de l'assiette déclenche un cycle de la cuillère. Vous pouvez ainsi vous alimenter seul, en n'utilisant qu'un seul contacteur externe raccordé à la prise 2. [La rotation automatique de l'assiette](#) est également activée lorsque vous sélectionnez le mode contacteur 1 – tourner légèrement l'assiette entre chaque ramassage de la cuillère.



Le mode contacteur 2, le bouton de gauche, (ou le contacteur externe 1) est utilisé pour actionner et suspendre le mouvement de la cuillère. Le bouton du milieu (ou contacteur externe 2) est utilisé pour tourner l'assiette de manière à aligner les aliments avec la cuillère pour que celle-ci ramasse les aliments.



Le mode contacteur 3 active le bouton droit de l'écran et le contacteur externe 3 qui sont utilisés pour actionner d'autres fonctionnalités décrites ci-dessous. Il est nécessaire d'utiliser ce mode pour accéder aux menus à l'aide des contacteurs externes.



Activer le snack

Sélectionner cette option pour activer l'utilisation d'une attache snack sur le Neater Eater.

Lorsque le Neater Eater est au repos, appuyez sur le bouton droit de l'écran ou sur le contacteur externe 3 pour sélectionner le mode snack. Appuyez à nouveau pour repasser au mode de ramassage. Appuyez sur marche pour ensuite porter le snack à votre bouche. (à utiliser avec une attache snack optionnelle)



Activer le piquage fourchette

Vous devez avoir une maîtrise totale de vos mouvements de tête et être certain qu'utiliser une fourchette ou une cuillère-fourchette est sans danger pour vous.

Lorsque le Neater Eater est au repos, appuyez sur le bouton droit ou le contacteur externe 3 pour sélectionner le mode de piquage. Appuyez à nouveau pour repasser au mode de ramassage. La cuillère-fourchette est recommandée ici, car elle convient à la fois pour piquer et ramasser des aliments.



Sélectionnez cette option pour activer d'autres paramètres de ramassage détaillés ci-après :

AUTRES PARAMÈTRES DE RAMASSAGE



Nettoyage automatique de la cuillère

Élimine les gouttes situées sous la cuillère en la raclant contre le bord de l'assiette à chaque cycle. L'assiette tourne à partir de l'endroit où la cuillère a ramassé des aliments, afin d'éviter de mélanger différents types d'aliments dans l'assiette.



Vider automatiquement la cuillère

La cuillère (ou fourchette ou cuillère-fourchette) est vidée à chaque cycle. L'assiette tourne à partir de l'endroit où la cuillère a ramassé des aliments, afin d'éviter de mélanger différents types d'aliments dans l'assiette.



Secouer l'assiette

Si Secouer l'assiette est sélectionné, celle-ci est légèrement secouée dans chaque direction pour rassembler les aliments contre le bord et faciliter ainsi le ramassage d'aliments collants.



Ramassage automatique de petites quantités d'aliments

Si les aliments sont collants, ou s'agglomèrent de manière importante, choisissez cette option pour ramasser moins d'aliments qu'en situation normale.

Le Neater Eater se rappelle combien de fois il a ramassé des aliments dans la section actuelle de l'assiette, et il règle son action de ramassage automatiquement selon les besoins. (ce mode utilise quatre actions de ramassage différentes au lieu des deux habituelles et implique que la cuillère s'écarte en premier lieu du bord de l'assiette avant de se soulever, pour ramasser moins d'aliments)



Départ du centre

Sélectionnez pour vous assurer que la cuillère ramasse toujours à partir du centre de l'assiette. Ce n'est pas très recommandé car trop de nourriture peut être ramassée dans la cuillère. (Il est préférable de laisser la cuillère ramasser près du bord de l'assiette et ensuite de ramasser à partir du centre de l'assiette.)



Contacteur cuillère

Par défaut, le Neater Eater réagit lorsque la cuillère est débranchée, et vous demande de la rebrancher. Cette fonctionnalité peut être désactivée (non recommandé).

PARAMÈTRES DE ROTATION DE L'ASSIETTE



Standard Gauche Droite

Par défaut la rotation de l'assiette se fait dans chaque direction. (sauf si la fonction de piquage est activée)



L'assiette ne tourne que vers la droite



Voir avant mise à la bouche

Alignez la nourriture à l'arrière de l'assiette. Elle tourne automatiquement d'un demi-tour avant de ramasser la nourriture, pour permettre à certains utilisateurs de mieux voir la nourriture.



Rotation automatique de l'assiette

Cette fonctionnalité fait tourner légèrement l'assiette entre chaque ramassage. Cela vous évite d'avoir à tourner l'assiette à chaque fois.



Angle de rotation automatique

Si vous avez sélectionné l'option rotation automatique, vous pouvez saisir le nombre de degrés de rotation à chaque cycle. Typiquement, il est recommandé d'indiquer 10 degrés. Lorsque vous effectuez ce réglage, l'assiette tournera automatiquement selon cette indication – tant qu'aucune assiette à compartiments n'est installée.



Passage au compartiment suivant

Cette fonctionnalité fait tourner l'assiette jusqu'au compartiment suivant entre chaque ramassage. Cela vous évite d'avoir à tourner l'assiette à chaque fois que vous souhaitez changez d'aliments entre deux bouchées.

AUTRES PARAMÈTRES



Angle de la cuillère

Par défaut, l'angle d'inclinaison de la cuillère est **Fixe** pour convenir au plus grand nombre d'utilisateurs et pour conserver les aliments dans la cuillère. Certains utilisateurs préfèrent que cet angle soit **réglable**. L'angle est ainsi défini lorsque la position de la bouche est saisie dans le mode Apprendre en mode manuel.



Affichage paramètres

Vous pouvez choisir entre thème clair ou foncé, contacteur On et Off, contacteur clics, contacteur animations et retour tactile. Pour changer entre thèmes clairs et foncés, vous devez activer et redémarrer l'appli Neater sur la tablette (code requis).



Paramètres du son

Le volume est ajusté en utilisant les boutons externes sur l'affichage.



Rapport de paramètres

Cette fonctionnalité affiche des informations de diagnostics.



Sélectionner un utilisateur

Sélectionnez un des cinq utilisateurs ayant chacun ses propres paramètres. Si vous sélectionnez un utilisateur sans nom, il vous est demandé de saisir un nom.

Pour **Changer le nom** d'un utilisateur, appuyez et maintenez le symbole concerné.

Une option permet également de [Gérer les utilisateurs](#).



Paramètres avancés

Vous devez saisir un Code d'accès pour accéder au [Menu paramètres avancés](#).

GÉRER LES UTILISATEURS



Copier un utilisateur

Copiez les paramètres de l'utilisateur actuel pour les autres utilisateurs.



Supprimer un utilisateur

Supprimer les paramètres d'un utilisateur, et retrouver les paramètres par défaut, sans nom d'utilisateur. Vous ne pouvez pas supprimer l'utilisateur actuel sélectionné ici.



Supprimer tous les utilisateurs

Cette fonctionnalité permet de supprimer tous les utilisateurs et rétablit les paramètres par défaut, sans nom d'utilisateur. (code d'accès requis). L'utilisateur 1 sera ensuite sélectionné en tant qu'utilisateur actuel nommé "Neater".

PARAMÈTRES AVANCÉS



Sensibilité de la cuillère

Les paramètres par défaut du détecteur intégré au Neater Eater lui permettent de détecter un choc brusque lorsque la cuillère se trouve près de votre bouche et lorsqu'elle détecte les assiettes. Ne pas utiliser ce détecteur comme dispositif de sécurité. Il est possible d'effectuer des réglages en cas de déclenchements intempestifs ou si le détecteur ne se déclenche pas. Il peut aussi être éteint – auquel cas le Neater Eater demande de sélectionner les assiettes au lieu de procéder à une auto-détection.



Gérer les variables

Ce menu permet de copier à distance les paramètres entre un ordinateur et plusieurs Neater Eaters, de rétablir les paramètres par défaut et de vérifier les modifications des variables individuelles. Pour certaines de ces fonctions, il faut posséder un code d'accès technicien.



Sortie de l'appli

Il faut saisir un code pour sortir de l'appli et pour mettre en œuvre les modifications entre thème d'écran clair et foncé. Si votre fournisseur Neater vous le mentionne, vous pouvez passer en Wi-Fi pour installer les mises à jour, télécharger des données et activer un dépannage à distance. N'oubliez pas de quitter le mode Wi-Fi lorsque vous redémarrez l'appli, afin d'éviter de décharger la batterie.



Accès au menu

Changer l'accessibilité du menu des paramètres. Aller à l'accès au menu



Mode démo

Pour accéder au mode démo, vous devez entrer un code PIN. Ce mode est utilisé pour présenter certaines fonctionnalités du Neater Eater.



Vérifier les données

Appuyez sur cette touche pour vérifier que le Neater Eater est correctement calibré. Le Neater Eater actionne son bras à trois sections de manière à ce que la cuillère installée soit à l'horizontal et que l'extrémité de celle-ci soit 20 mm vers l'intérieur, et à niveau avec le bord de l'assiette en place. Un code technicien est nécessaire pour rétablir les données positions en suivant les instructions à l'écran. (un paramétrage incorrect peut endommager le Neater Eater).



Langue

La langue est paramétrée hors de l'application du robot Neater Eater. Veuillez vous référer aux instructions en ligne pour modifier la langue : www.neater.co.uk

ACCÈS AU MENU



Menu Options verrouillage

Par défaut, vous pouvez accéder aux Menus paramètres.

Pour anticiper tout accès involontaire aux Paramètres, vous pouvez choisir de demander une confirmation systématique avant d'entrer dans Paramètres.

Une option demande également la saisie systématique d'un code PIN pour accéder aux Menus paramètres.

Code d'accès



Changement du code d'accès – changez votre code PIN pour accéder aux Paramètres avancés et aux Paramètres si vous avez défini la saisie d'un code pour accéder à ces menus. Le code initial est 1234.



Accès menu contacteur

Permet d'accéder au menu paramètres à l'aide des contacteurs externes.

Les contacteurs externes 2 et 3 peuvent être utilisés pour répertorier les options ; le contacteur externe 1 pour les sélectionner. S'il n'y a que 3 options à choisir, le contacteur externe 1 correspond à l'option 1, le 2 à la 2e et le 3 à la 3e. Pour répondre aux questions oui/non, utilisez le contacteur externe 1 pour Oui et 3 pour Non.

LE DIAGNOSTIC DES ANOMALIES



UN PROBLÈME ? Redémarrez le robot et attendez que l'écran de veille/démarrage s'affiche



Problèmes d'excavation des aliments

Assurez-vous que les aliments sont coupés pour les ramasser. De gros morceaux de nourriture peuvent tomber de la cuillère en tirant d'autres aliments avec eux. La nourriture collante peut parfois coller sur elle-même et l'assiette plutôt que la cuillère ou trop peut être écopée sur la cuillère pour que vous mangiez. Essayez d'utiliser une cuillère plus petite ou allumez [Secouer l'assiette](#) et [Auto Scoop Moins de nourriture](#).

Bluetooth non connecté



Assurez-vous que le robot Neater Eater est allumé en appuyant sur le bouton de devant. La lumière dans l'interrupteur indique qu'il est allumé. S'il ne s'allume pas, les piles peuvent être très faibles. Branchez l'alimentation à l'arrière et réessayez. Les nouvelles tablettes donneront ce message au premier démarrage. Contactez votre fournisseur Neater pour la mise en place.

SANTÉ ET SECURITÉ AVANCÉES

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant toute utilisation, et en particulier avant d'effectuer des réglages. Une utilisation inappropriée et un réglage incorrect peuvent endommager le Neater Eater et/ou rendre son utilisation dangereuse.
- Le Neater Eater ne doit être utilisé que pour aider à consommer des denrées alimentaires ou pour tenir de légers objets non dangereux. Assurez-vous que les aliments ne soient pas brûlants.
- Le Neater Eater ne doit pas être utilisé par des personnes atteintes de troubles de déglutition ou susceptibles de s'étouffer, sauf sous la surveillance ou avec l'accord d'un(e) orthophoniste.
- N'essayez pas d'ingérer de grandes quantités d'aliments en une seule bouchée, au risque de vous étouffer. Si nécessaire, utilisez des couverts plus fins afin de réduire ce risque.
- La présence d'un soignant est toujours nécessaire s'il y a le moindre risque d'étouffement ou d'autre danger.
- Nettoyez toutes les pièces avant chaque repas et vérifiez qu'il n'y a ni fissure, ni éclat sur ces différentes pièces. Ce détail est particulièrement important pour les pièces en contact avec les aliments ou avec la bouche de l'utilisateur. La majorité des couverts en plastique finissent par se fissurer. Ces fissures peuvent contenir des germes, créer des bords acérés et des éclats peuvent se détacher de la pièce et être avalés. Les assiettes en céramique peuvent s'ébrécher et présenter des bords acérés.
- Avant chaque repas, vérifiez que la cheville située à la base de l'assiette est fermement fixée.
- N'utilisez que les fixations fournies par les distributeurs agréés Neater Eater.
- Si le Neater Eater est susceptible de tomber de la table, utilisez les serre-joints disponibles. Si vous les utilisez, assurez-vous que le Neater Eater est fermement fixé à une table robuste pour qu'il ne soit pas déséquilibré.
- Veillez à ne pas diriger les couverts vers vos yeux ou le fond de votre gorge.
- Les personnes atteintes de mouvements incontrôlés, en particulier les mouvements du corps ou de la tête, ne doivent utiliser aucun couvert rigide ou tranchant, telles les cuillères ou les fourchettes en métal.
- Veillez à ne pas heurter les serre-joints lorsque vous déplacez le Neater Eater et le positionnez pour être utilisé.
- Nettoyez le Neater Eater après chaque repas afin d'éviter toute accumulation d'aliments susceptibles de contenir des germes, de s'introduire dans le mécanisme du Neater Eater et de l'endommager. Assurez-vous que la vaisselle et les couverts sont correctement nettoyés.
- La vaisselle et les couverts fournis avec le Neater Eater sont destinés à un usage alimentaire. D'autres ustensiles peuvent être dangereux pour aspirer ou mâcher des aliments.
- Manger en trop grande quantité, ou se sentir fatigué sont deux des effets secondaires dus à l'utilisation du Neater Eater. Il est recommandé de demander conseil par exemple : à un(e) diététicien et un(e) kinésithérapeute.
- Les robots Neater Eater sont conformes aux exigences essentielles de la Directive relative aux dispositifs médicaux de classe 1 (Directive du Conseil européen 93-52-CEE du 14 juin 1993).